



# Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD 257



## INTRODUCCIÓN

Productos fabricados y diseñados de acuerdo con las más estrictas normas de calidad y seguridad y se ajustan a las directivas europeas (MDD 93/42/EEC).

Es imprescindible observar las siguientes indicaciones de utilización y mantenimiento:

- Antes de cualquier utilización, compruebe que el producto le haya sido entregado en perfecto estado.
- Póngase en contacto con el vendedor si tiene dudas respecto a las limitaciones de uso, al ajuste o al mantenimiento del producto.
- No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en las especificaciones del producto.
- Procure siempre que el producto se adapte a sus necesidades. En caso de duda, consulte con un profesional de la salud.
- Haga sustituir inmediatamente las piezas gastadas, dañadas o faltantes.
- Compruebe periódicamente la estabilidad y rigidez del producto, y en su caso, el correcto ajuste de los tornillos y el estado de las conteras de goma.
- Es imprescindible prestar mucha atención cuando se utiliza el producto sobre una superficie húmeda.

## APERTURA Y PLEGADO DEL ANDADOR



**Cuando utilice el andador este deberá estar siempre completamente abierto y anclado.**

1. Empuje la barra transversal (A) del sistema de plegado hacia abajo para la apertura.

2. Tire de la barra transversal (A) del sistema de plegado hacia arriba para plegar el andador.





## MONTAJE DE LAS EMPUÑADURAS

Monte la empuñadura derecha en el orificio derecho y la empuñadura izquierda en el orificio izquierdo, con la parte ondulada en el interior y la parte lisa en el exterior.

## REGULACIÓN

Utilice los pomos (B) para fijar los tubos a la altura correcta. Saque completamente el tornillo, regule los tubos a la altura deseada y vuelva a insertar el tornillo por el orificio fijándolos con los pomos (B).

**NOTA:** Se debe ajustar de manera que la empuñadura esté a la altura (C) de la muñeca del brazo del usuario en reposo.

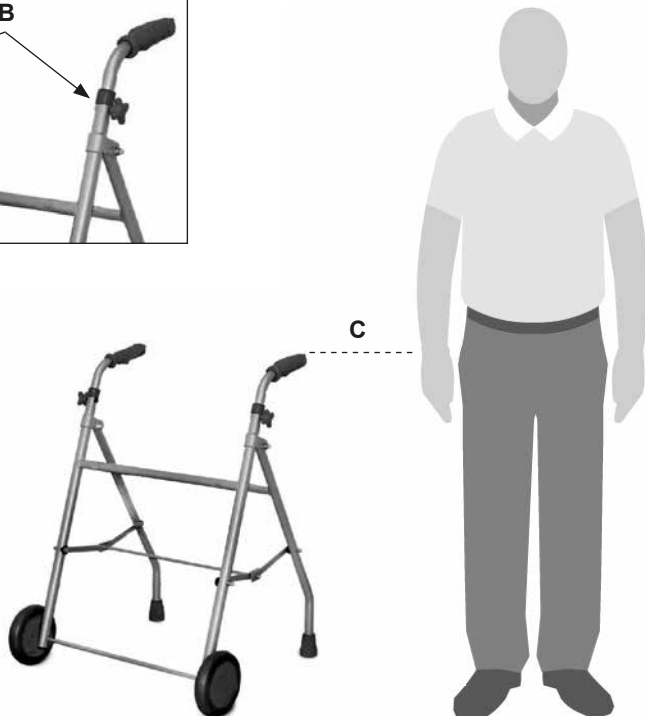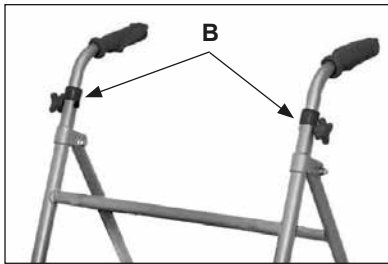

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el caminador AD257, utilice un paño suave humedecido para limpiar el polvo y la suciedad. Utilice agua jabonosa para la suciedad más resistente. Seque con un paño suave.

Compruebe regularmente el estado de las conteras y reemplácelas cuando se desgasten. Conteras de 22 mm de diámetro.

## ESPECIFICACIONES

### Modelo AD257

Ancho	58 cm
Fondo	56 cm
Alto puños	74 a 88 cm
Peso	2,5 kg
Peso máx.	100 kg

### GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la ley de garantías vigente que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Si no sigue las instrucciones, advertencias y notas del manual de utilización, podría ocasionar lesiones físicas a usted o a terceros o daños en el producto, además de anular la garantía del mismo.



Importado por:  
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.  
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
info@ayudasdinamicas.com  
www.ayudasdinamicas.com

